


# GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

## RADIOFREQUENCE

 Manuel de l'utilisateur

RF CLINIC PRO

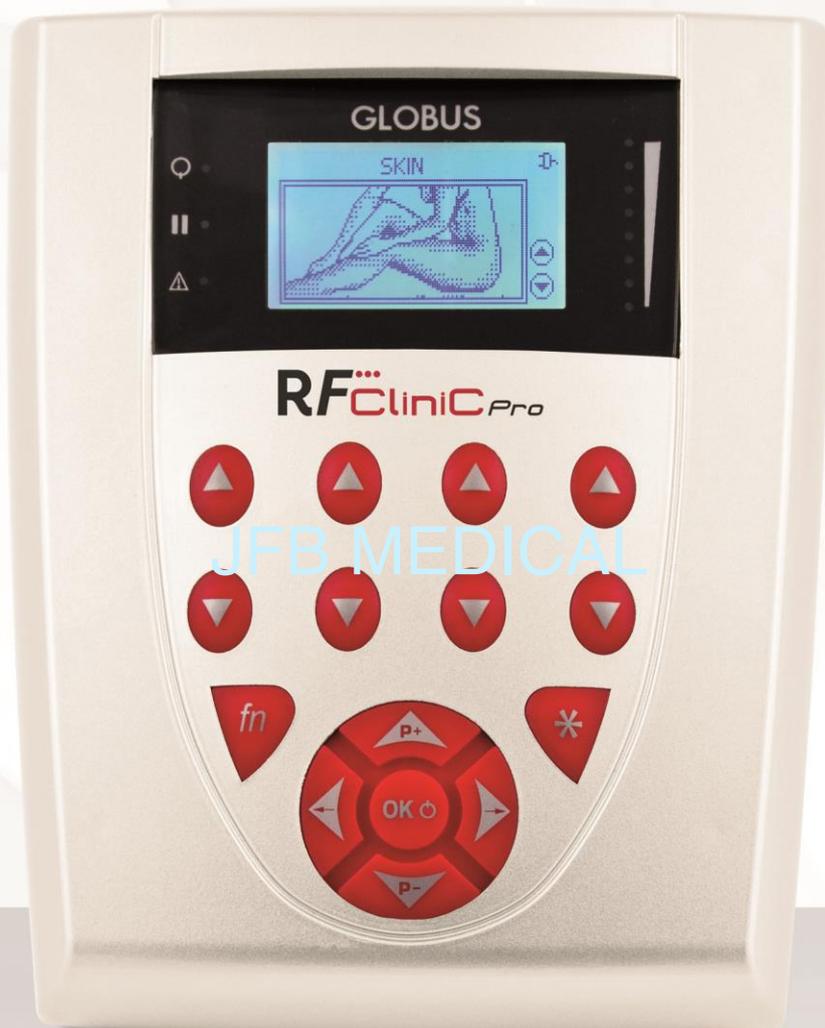

CE

# JFB MEDICAL

**CHER CLIENT**

**NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CHOIX ET NOUS SOMMES À VOTRE ENTIÈRE  
DISPOSITION POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU AIDE**

Les dispositifs pour la radiofréquence "RF Clinic Pro" sont produits et distribués par :

**DOMINO SRL**

Via Vittorio Veneto, 52  
31013 Codognè - TV (Italie)

Tél : (+39) 0438 7933

[www.globuscorporation.com](http://www.globuscorporation.com)

[info@globuscorporation.com](mailto:info@globuscorporation.com)

**JFB MEDICAL 46 route des bancs de pierre  
69690 Bessenay  
04 74 70 89 08**

**JFB MEDICAL**

## INDEX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .....	5
Dispositif .....	5
Accessoires inclus.....	5
ÉQUIPEMENT.....	6
DESTINATION D'EMPLOI .....	6
CONNEXIONS .....	6
Dispositif .....	6
.....	7
ÉTIQUETAGE ET SYMBOLES.....	7
Accessoires .....	8
Dispositif .....	8
Interface et commandes .....	9
Écran .....	9
ALARMES .....	11
AVERTISSEMENTS ET CONTRE-INDICATIONS .....	11
Comportement obligatoire .....	11
Avertissements avant l'utilisation .....	11
Avertissements pour l'utilisation.....	12
Effets secondaires .....	12
Contre-indications .....	12
ENTRETIEN ET NETTOYAGE .....	13
Dispositif et accessoires.....	13
Transport .....	13
Élimination .....	13
MODE D'EMPLOI.....	14
LISTE PROGRAMMES.....	15
MODE D'APPLICATION .....	16

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

### **Dispositif**

Boîte :	en ABS
Degré de protection de la boîte :	IP 20
Dimension :	170 x 220 x 60 mm
Poids :	environ 870 g
Puissance :	200 W ( à 50 ohm)
Fréquences :	de 470 Khz à 2 Mhz
Modalité de transfert :	résistive :

### **Conditions de transport et stockage**

Température de transport et de stockage:	de -10°C à 45°C
Humidité relative maximale :	75%
Pression atmosphérique :	de 700 hPa à 1060 hPa

### **Conditions d'utilisation**

Température :	de 0°C à 40°C
Humidité relative maximale :	de 30% à 75%
Pression atmosphérique :	de 700 hPa à 1060 hPa

### **Alimentateur :**

Modèle : GlobTek GTM91099-6024-6.0-T2

PRI : 100-240V – 50-60Hz

SEC : 18Vd.c. 3.3A Max

Polarité : 

### **Accessoires inclus**

#### **Tête Rf Clinic 100**

La tête RF Clinic 100 est bipolaire et à deux sphères, idéale pour des traitements visage et décolleté.

#### **Tête Rf Clinic 500**


La tête RF Clinic 500 est bipolaire et concentrique. La surface conductrice est composée de deux points de contact en nickel biocompatible, un point intérieur cylindrique et l'autre extérieure circulaire, concentriques les uns aux autres et séparés par un anneau isolant. Chaque partie est reliée à l'un des pôles du câble de raccordement. Le diamètre de la tête bipolaire fournie est de Ø 50 mm.

### **Accessoires non inclus**

**Batterie:** 12V 4000mA (non incluse, accessoire optionnel)

## ÉQUIPEMENT

- A. Mallette de transport
- B. Dispositif
- C. 1 tête RF Clinic 500
- D. 1 tête RF Clinic 100
- E. Alimentateur (voir caractéristiques techniques)
- F. Manuel d'utilisation
- G. 2 boîtes de crème 50 ml

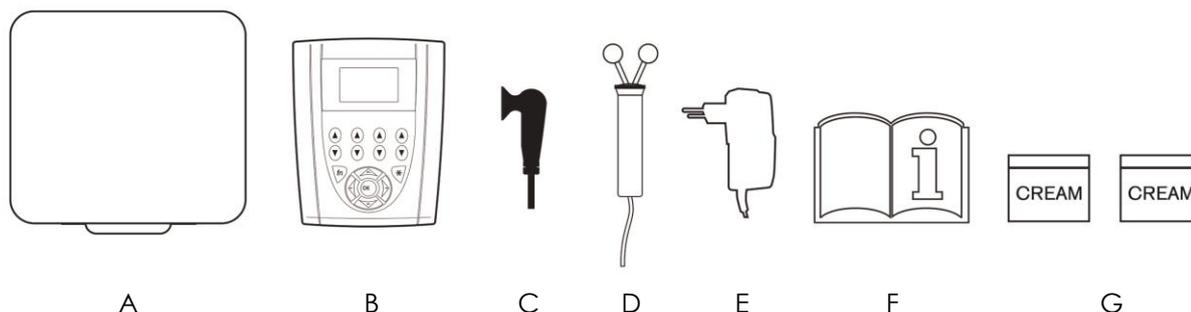

Après avoir ouvert l'emballage, assurez-vous que la dotation de base est complète. En cas d'objet manquant, veuillez contacter le revendeur agréé chez lequel vous avez acheté le produit.

Contrôlez l'intégrité de l'appareil et des accessoires.

## DESTINATION D'EMPLOI

La durée de vie estimée pour le produit est de 5 ans. On conseille le retour du produit chez le fabricant et/ou un centre autorisé tous les 2 ans pour l'entretien et la vérification de sécurité.

Les dispositifs Rf Clinic Pro ont été étudiés pour être utilisés dans des milieux tels que :

- milieux domestiques ;
- pour l'utilisation esthétique personnelle opportunément informés des méthodes utilisées par l'appareil

JFB MEDICAL

## CONNEXIONS

### **Dispositif**

Le dispositif fonctionne branché au réseau électrique. Pour relier l'alimentateur au connecteur branchez la prise comme représenté dans l'image (ci-dessous).

**Branchez tout d'abord le connecteur au dispositif, puis le connecter au réseau électrique.**



Connexion  
alimentateur

Connexion têtes

Pour brancher la tête au dispositif, insérez le connecteur à la sortie B en plaçant les rainures vers le bas.

### **BATTERIE : comment charger les batteries (accessoire optionnel)**

L'appareil est muni d'un paquet de batteries rechargeables (12V, 2Ah) au Nickel Métal-Hydrure à haute performance et sans effet mémoire.

Lorsque sur l'écran l'indicateur de batterie indique 1/4 de charge on conseille de s'occuper de la recharge. Après avoir éteint le dispositif, connectez-le à l'alimentateur fourni en branchant le connecteur à la prise spécifique (voir image A).

Ne jamais utiliser un alimentateur différent de celui fourni avec l'appareil. Pour le remplacement du paquet de batteries, contactez l'assistance.

JFB MEDICAL

### **ÉTIQUETAGE ET SYMBOLES**

	<p>Symbole DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques). Symbole du recyclage.</p> <p>Le symbole DEEE utilisé pour ce produit indique que ce dernier ne peut pas être traité comme déchet domestique. L'élimination correcte de ce produit contribuera à protéger l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, adressez-vous au bureau de l'organisme locale compétent, à la société chargée de l'élimination des ordures ménagères ou au magasin où le produit a été acheté.</p>
	<p>Ce symbole sur votre appareil sert à indiquer qu'il est en conformité avec les conditions requises des directives en vigueur.</p>
	<p>Indique que le produit est réalisé dans le respect de la directive 2011/65/UE</p>
	<p>Indique que la lecture du manuel est obligatoire avant d'utiliser le dispositif</p>

	On fait allusion au fabricant
PRI	Tension du réseau électrique
SEC	Tension d'alimentation du dispositif

## Accessoires


Étiquette crème conductrice Globus

	N'ingérez pas
	Produit hypoallergénique
	Le produit n'est utilisable que extérieurement, sur la peau intacte.
	Le produit est jetable. Pour traiter plusieurs patients, utilisez le doseur spécifique ou des petites spatules jetables.
	Indique le symbole du polyéthylène.
	Ne pas jeter dans la nature après l'utilisation.

## Dispositif




## Interface et commandes

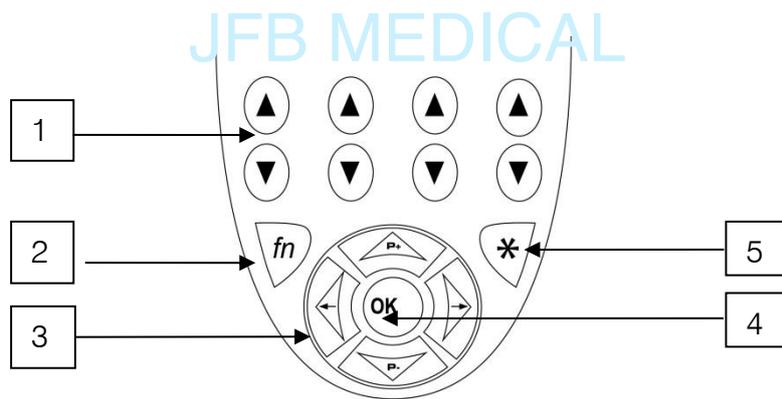

Touches augmentation-diminution. Les touches en haut augmentent, les touches en bas diminuent. Les touches supérieures augmentent la puissance de 5%, tandis que les touches en bas la diminuent de 5%.

- 1- Touche fn : non active.
- 2- Touches direction (P+, P-, droite et gauche) pour faire défiler les options du menu de navigation, touche flèche à gauche pour revenir à la page-écran précédente.
- 3- Touche allumage-arrêt et pause.
- 4- Touche astérisque pour modifier la durée du traitement.

## Écran

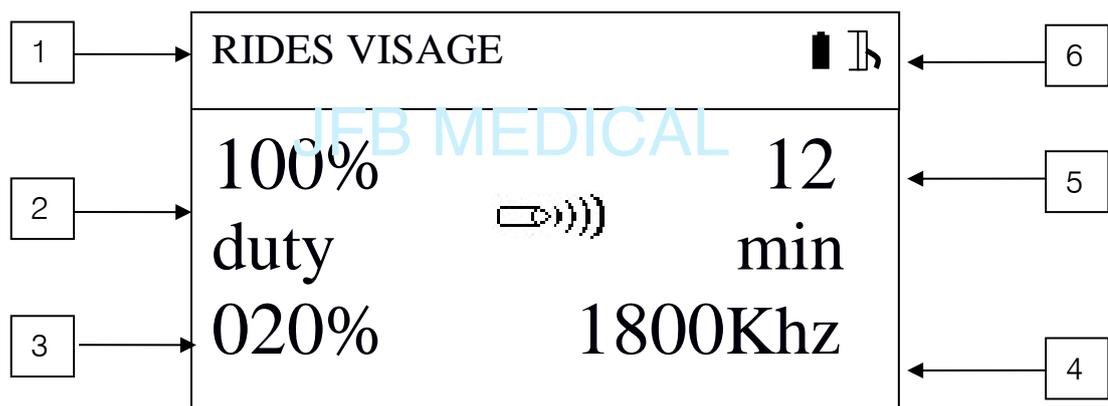

- 1- Indique le nom du programme choisi.
- 2- Indique le pourcentage de duty cycle émise par le dispositif. Lorsque le duty cycle est à 100, cela signifie que l'appareil émet de façon continue pour toute la durée du traitement. Un duty cycle inférieur, par exemple de 50%,

indique une émission de 50% du temps sur une base de 1 seconde. L'effet thermique d'un programme, avec la même puissance émise, sera plus bas avec des duty cycles inférieurs.

- 3- Indique le pourcentage de puissance émise par le dispositif.
- 4- Indique la fréquence en Khz utilisée par le programme.
- 5- Indique la durée du programme en minutes.
- 6- Le symbole de la prise électrique indique que le dispositif est correctement branché au réseau, tandis que le symbole avec la batterie indique que le dispositif fonctionne à batterie.

## Alarmes lumineux



Indicateur On/Off

Indicateur PAUSE (pendant le traitement)

Indicateur erreur général. Si le voyant s'allume vérifier les liaisons câbles/électrodes. Si le voyant reste allumé, contactez l'assistance.



Indicateur niveaux de puissance

## Alarmes sonores

Pendant l'utilisation, le dispositif émet un son similaire à "do-ré-mi", qui indique un émission correcte.


Un bip long indique la fin du traitement.

Les signaux sonores peuvent être désactivés dans le menu réglage.

# JFB MEDICAL

## ALARMES

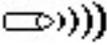

	<u>Émission correcte de puissance</u> : Le traitement se déroule correctement, il y a une émission laser.
	<u>Câble non branché</u> : Vérifiez que le câble soit relié à la bonne sortie.
	<u>Appareil en pause</u> : Appuyez sur OK pour continuer le traitement.
	<u>Appareil en mode veille</u> : appuyez sur la touche sur la tête pour initialiser l'émission.

## AVERTISSEMENTS ET CONTRE-INDICATIONS

### **Comportement obligatoire**

Pour maintenir le niveau maximal de sécurité, l'utilisateur doit utiliser l'appareil dans le respect des prescriptions et des limites d'utilisation du mode d'emploi.

Le producteur décline toute responsabilité à propos d'une utilisation différente de ce qui est indiqué et prescrit dans le présent manuel.

Sans l'autorisation écrite du producteur, la reproduction de textes et/ou de photos contenus dans ce manuel, même que partielle, sous n'importe quelle forme et par n'importe quel moyen électronique ou mécanique, est interdite.

Si l'emballage, le câble ou le connecteur de l'alimentateur présentent des signes d'usure ou d'endommagement il faut s'occuper du remplacement immédiat du même.

L'appareil doit être relié à la ligne électrique à travers son alimentateur, avant d'exécuter cette opération veuillez vérifier que l'installation soit conforme aux directives en vigueur dans votre Pays. Ne placez pas l'alimentateur de manière qu'il soit difficile de le déconnecter de la prise d'alimentation.

Aucune modification de l'appareil n'est admise.

### **Avertissements avant l'utilisation**

**DANGER DE BRÛLURES** : une mauvaise utilisation du système peut provoquer des brûlures au sujet traité.

Nous ne recommandons pas l'utilisation de l'appareil en même temps avec d'autres appareils électroniques, en particulier avec ceux qui sont utilisés pour le maintien des fonctions vitales ; voir les tableaux ci-dessous pour le bon

fonctionnement de votre appareil électromédical. En cas de nécessité d'une utilisation conjointe d'autres appareils, veuillez observer le bon fonctionnement. Il est conseillé de lire attentivement tout le mode d'emploi avant d'utiliser le dispositif ; gardez le présent manuel avec soin.

Avant chaque utilisation contrôlez toujours l'intégrité de l'appareil, condition indispensable pour l'exécution de la thérapie ; n'utilisez pas l'unité si celle-ci présente des défauts ou des mal fonctionnements des câbles ou des touches.

N'utilisez pas des produits inflammables pendant l'application du dispositif.

Le dispositif ne doit pas être laissé à la portée des enfants.

Pendant le traitement, il est mieux d'enlever les objets métalliques, tels que bracelets, colliers, piercings, etc.

Il faut s'assurer que la peau du patient, avant de commencer le traitement, est propre et sèche.

### **Avertissements pour l'utilisation**

Pendant l'utilisation du dispositif, il faut s'assurer que les têtes soient bien couvertes de crème conductrice et que toute leur surface soit maintenue en contact avec la peau du sujet.

Ajustez la puissance d'émission en fonction de la tolérance individuelle à la chaleur.

Ne laissez pas la tête immobile pendant l'émission, comme cela peut causer des brûlures.

### **Effets secondaires**

- Rougeur
- Irritation cutanée

### **Contre-indications**

L'utilisation de l'appareil pour la radiofréquence est contre-indiquée :

- chez les patients porteurs de pacemaker et d'autres dispositifs électroniques implantables.
- Ne pas traiter les yeux.
- Ne pas effectuer des traitements sur les femmes enceintes.
- Ne pas effectuer près de fillers résorbables et non résorbables.

Éviter absolument d'effectuer des traitements sur des surfaces du corps insensibles à la chaleur et en présence d'une des maladies suivantes :

- néoplasmes ;
- insuffisance cardiovasculaire sévère ;
- hémorragies ;
- infections locales ou systémiques ;
- pathologies dermatologiques actives ;
- tissus ischémiques ;
- fièvre ;

JFB MEDICAL

- altération de la coagulation ;
- A considérer comme des précautions relatives :
- la présence de zones du corps avec peu de sensibilité (zones hypoesthésiques) ;
  - sujets particulièrement obèses ;
  - maladies inflammatoires aiguës.

## **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

### **Dispositif et accessoires**

- En cas de dommage réel ou présumé ne pas ouvrir le dispositif ou ne pas tenter par soi-même de le réparer.

Ne pas intervenir sur la machine et ne pas l'ouvrir. Les réparations ne peuvent être effectuées que par un centre spécialisé et autorisé.

- Évitez des chocs violents qui pourraient endommager l'appareil et en déterminer un mauvais fonctionnement même non immédiatement vérifiable.

- Le dispositif doit être utilisé dans un milieu sec et libre en air (pas enveloppé par d'autres objets).

- Nettoyez le dispositif et les accessoires seulement avec un désinfectant ou des sels d'ammonium quaternaire dilués en eau distillée avec un pourcentage de 0,2-0,3%. S'assurer d'enlever tout reste de crème de la plaque et des électrodes mobiles. A la fin du nettoyage/désinfection, le dispositif et ses accessoires doivent être parfaitement essuyés avec l'utilisation d'un chiffon propre.

- Utilisez le dispositif et les accessoires toujours avec les mains convenablement propres.

- On recommande d'utiliser l'appareil dans un milieu propre, afin d'éviter la contamination du dispositif et des accessoires avec la poussière et la saleté.

- On recommande d'utiliser le dispositif dans un milieu régulièrement aéré et ventilé.

- Il est conseillé de nettoyer/désinfecter les électrodes après chaque usage, sauf indication contraire. Concernant les autres parties qui pourraient entrer en contact avec la personne traitée il est recommandé de les nettoyer si nécessaire.

- Le produit et ses accessoires, lorsque vous ne les utilisez pas et/ou en cas de transport, doivent être conservés dans leur emballage d'origine.

### **Transport**

Après utilisation ou pendant le transport, l'appareil et ses accessoires sont stockés à l'intérieur de la mallette et disposés comme à l'origine.

### **Élimination**

Ne jetez pas l'appareil ou ses parties dans le feu, mais éliminez le produit dans les centres spécialisés et de toute façon dans le respect des législations en vigueur dans votre Pays. On informe l'utilisateur qu'il peut rendre le produit à la fin du cycle de vie au distributeur à l'achat d'un nouveau appareillage.

## **MODE D'EMPLOI**

### **Allumage/Arrêt du dispositif**

- Branchez le connecteur de l'alimentation dans l'emplacement prévu.
- appuyez pendant quelques secondes le bouton ON-OFF. L'écran s'allume et un bip confirme l'allumage réussi.

Pour éteindre l'appareil maintenez appuyé sur le bouton ON-OFF.

**Pour sélectionner une option du menu, déplacez-vous avec les flèches direction et appuyez sur la touche ok.**

### **Menu initial**

LISTE PROGRAMMES  
NOUVEAUX PROGRAMMES  
PARAMÈTRES

### **Liste programmes**

En choisissant "Liste programmes" vous allez visualiser les sections VISAGE, PEAU, CELLULITE et MY PROGRAMS. Sélectionnez le programme souhaité.

Après avoir choisi le programme, appuyez sur la touche ok et commencez le traitement. Les paramètres des programmes sont déjà réglés, cependant on peut régler la puissance d'émission en utilisant les touches spécifiques.

### **Modifie la durée du traitement**

Pour modifier la durée du traitement, appuyez sur la touche \* et réglez le temps en utilisant les touches P+ et P-.

### **Nouveaux programmes**

En choisissant "Nouveaux programmes" on peut créer des programmes personnalisés, qui seront enregistrés dans la section My Programs (dans liste programmes).

### **Paramètres**

**Pour se déplacer entre les options, utilisez les flèches P+ et P-. Pour modifier la valeur, utilisez les touches augmentation et diminution.**

- Fréquence : modifiable avec possibilité de choix entre 470, 900, 110, 1200, 1500, 1600, 1800, 2000 KHz.
- Tension : indique la puissance, insérez un pourcentage.
- Durée : modifiable jusqu'au maximum de 59 minutes.
- Duty cycle: modifiable de 10% à 100% avec steps de 10.

Une fois terminé, appuyez sur la touche Ok et insérez le nom du programme.  
 Pour modifier une lettre utilisez les touches augmentation et diminution, pour vous déplacer à la lettre suivante utilisez les touches direction droite et gauche. À la fin, appuyez sur Ok pour enregistrer le programme.  
 On peut mémoriser jusqu'à 30 programmes.

### **Paramètres**

Le menu réglage permet d'accéder à la modification de certaines fonctions. Dans cette page-écran on peut visualiser aussi le numéro de logiciel (Gui et Pow).

**Alarmes sonores** : permet d'activer ou de désactiver les alarmes sonores. Le choix sera visible avec le symbole d'une petite cloche et le mot ON en cas d'activation ou bien d'une cloche barrée et le mot OFF en cas d'alarme désactivé.

**Arrêt automatique** : permet d'établir un temps en minutes après lequel le dispositif non utilisé s'éteint automatiquement. On peut établir un temps de 1 à 20 minutes.

**Contraste** : permet de modifier le contraste de l'écran d'une valeur très basse et claire (1) à un ton intense (valeur 16).

**Langue** : on peut choisir la langue du menu de navigation de l'appareil.

### **LISTE PROGRAMMES**

NOM PROGRAMME	DUTY CYCLE	TEMPS min.	Intensité conseillée
<b>VISAGE</b>			
Rides visage	100%	<b>12</b>	de 60% à 90%
Rides yeux	100%	<b>10</b>	de 60% à 90%
Acné visage	100%	<b>8</b>	de 60% à 90%
Mini-lifting Visage	100%	<b>12</b>	de 60% à 90%
Couperose	100%	<b>12</b>	de 60% à 90%
Furoncles Visage	100%	<b>10</b>	de 60% à 90%
Anti-âge	100%	<b>15</b>	de 60% à 90%
<b>PEAU</b>			
Acné peau	100%	<b>18</b>	de 60% à 90%
Rides Corps	100%	<b>20</b>	de 60% à 90%
Rides peau sensible	100%	<b>18</b>	de 60% à 90%
Micro-Lifting décolleté	100%	<b>16</b>	de 60% à 90%
Vergetures	100%	<b>16</b>	de 60% à 90%
Élasticité peau	100%	<b>20</b>	de 60% à 90%
Collagène Bio-Skin	100%	<b>18</b>	de 60% à 90%
Cicatrices	100%	<b>12</b>	de 60% à 90%
Furoncles corps	100%	<b>18</b>	de 60% à 90%



Restructuration de la peau	100%	<b>20</b>	de 60% à 90%
Lissage peau	100%	<b>20</b>	de 60% à 90%
Raffermissment	100%	<b>14</b>	de 60% à 90%
Massage	100%	<b>20</b>	de 60% à 90%
<b>CELLULITE</b>			
Lipolyse	100%	<b>20</b>	de 60% à 90%
Cellulite	100%	<b>20</b>	de 60% à 90%
Cellulite œdémateuse	100%	<b>18</b>	de 60% à 90%
Cellulite fibreuse	100%	<b>20</b>	de 60% à 90%
Culotte de Cheval	100%	<b>15</b>	de 60% à 90%
Cellulite peau d'orange	100%	<b>15</b>	de 60% à 90%
Adiposité abdominale homme	100%	<b>12</b>	de 60% à 90%
Adiposité flancs homme	100%	<b>14</b>	de 60% à 90%
Adiposité membres inférieures homme	100%	<b>18</b>	de 60% à 90%
Adiposité membres supérieures homme	100%	<b>12</b>	de 60% à 90%

## **MODE D'APPLICATION**

Pour les applications visage et décolleté, on conseille d'utiliser la tête à deux sphères, tandis que pour les traitements corps on conseille la tête cylindrique.

La tête de traitement doit être appliquée de manière perpendiculaire à la zone à traiter et faite défiler lentement avec des mouvements circulaires, en ramassant la crème de temps en temps. Pour éviter la surchauffe de la zone de traitement il est nécessaire de déplacer la tête avec un mouvement lent et uniforme, en faisant attention de ne pas l'arrêter. Avant d'appliquer nettoyez soigneusement la peau et assurez-vous qu'il n'y a pas de traces de détergent ou d'autres produits.

Les traitements sur le visage doivent être effectués en tirant la peau vers l'extérieur et vers le haut, dans le but de donner plus de soutien aux tissus.

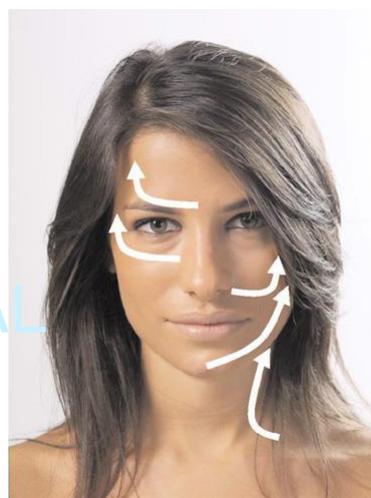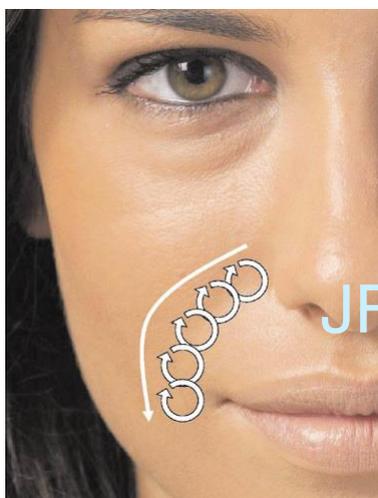

## **Les applications**

Le protocole conseillé est un cycle de 10-15 séances avec une fréquence de deux/trois fois par semaine, à répéter au moins après six mois. Les premiers progrès sont normalement visibles après chaque traitement et ils sont causés principalement par l'action sur la micro-circulation locale. Après 10 séances, la compacité de la peau devient subjective et peut varier selon l'utilisateur.

## **Rides**

On peut traiter des nombreuses zones : visage (front, contour yeux, contour bouche et nez, ligne mandibulaire, contour visage). RF Clinic détermine aussi une atténuation des " pattes d'oie " et des laxités de cou et décolleté, bras (coté intérieur), dos des mains, abdomen et flancs, cuisses intérieures et fessiers.

## **Rides peau sensible**

Comme ci-dessus, mais spécifique pour une peau particulièrement sensible.

## **Acné visage**

Sur les cicatrices de l'acné, traitées jusqu'à maintenant avec peu de résultats, l'énergie émise par RF Clinic provoque la formation de nouveau collagène qui aplanit les cicatrices acnéiques et effectue une action de drainage lymphatique qui favorise la régénération cutanée. RF est efficace aussi dans les formes actives d'acné vulgaire, où il détermine une amélioration de la composante inflammatoire, avec l'inhibition

de l'activité des glandes sébacés, comme on voit par une onctuosité réduite de la zone traitée.

## **Micro-lifting**

L'innovant (mais aussi expérimental et officiellement reconnu pour utilisation médicale depuis des années) système à ondes radios à certaines fréquences (inoffensives pour le corps), est idéal pour tous les cas de relaxation cutanée causée par la perte de fibres collagènes et élastiques, responsable, indépendamment de l'âge, de la perte d'élasticité et de tonus des tissus, avec un conséquent aspect décadent de la partie du corps intéressée (qui va apparaître lâche, inélastique, hypotonique et dystrophique, avec un aspect sénéscent et ridé).

## **Vergetures**

RF Clinic agit surtout sur les striae rubrae avec la régression des vergetures en phase inflammatoire et sur l'amélioration des vergetures stabilisées (striae albae). L'effet est évident dès le début et se consolide dans les mois suivants. La peau traitée est plus épaisse : la chaleur stimule les fibroblastes à développer le processus d'autoréparation du derme avec la synthèse de nouveau collagène, même dans les cas de renouvellement cellulaire diminué ou ralenti lié à l'âge avancé.

## **Cicatrices**

Le même principe de fonctionnement, mais étudié spécifiquement pour des applications sur le tissu cicatriciel.

De plus, l'énergie émise par RF Clinic provoque la formation de nouveau collagène, qui aplanit les cicatrices.

## **Élasticité**

L'inférieure activité des fibroblastes, causée par le vieillissement, mais pas seulement, c'est-à-dire des fibres qui produisent le collagène et l'élastine, détermine aussi la perte d'élasticité de la peau. Ce programme est particulièrement indiqué pour contraster ce phénomène à travers une majeure production d'élastine.

## **Collagène Bio-Skin**

Le patrimoine de collagène subit un processus physiologique progressif de détérioration, lié au patrimoine génétique et à plusieurs facteurs environnementaux (comme le tabagisme, l'alcool, le stress oxydant, l'exposition aux rayons solaires, les mauvaises habitudes alimentaires et un style de vie incorrect). La perte de collagène se manifeste avec l'apparition des premières rides et avec une progressive

perte de tonus cutané. RF Clinic, avec son programme étudié spécifiquement, stimule la production de collagène, à travers une biostimulation cutanée.

## **CONDITIONS DE GARANTIE**

L'appareil est garanti au premier utilisateur pendant une période de 24 mois à partir de la date d'achat contre les défauts de matériels ou de fabrication, pourvu que l'appareil soit utilisé de façon appropriée et maintenu dans les conditions normales d'efficacité.

La validité de la garantie est limitée dans les cas suivants :

- six (6) mois pour les accessoires fournis comme, par exemple, les alimentateurs, les têtes, etc.
- aucune garantie pour les accessoires et les matériaux qui doivent être considérés « de consommation » comme, par exemple, les crèmes.

Cette garantie est valable dans le pays où le produit a été acheté. Si le produit a été acheté dans un Pays de l'Union Européenne, la garantie est valable dans tous les États membres.

Pour bénéficier du service de garantie, l'utilisateur doit respecter les clauses de garantie suivantes :

1. Les produits devront être consignés pour la réparation dans les emballages originaux aux frais du client.
2. La garantie est subordonnée à la présentation d'un document fiscal

(ticket ou facture), indiquant la date d'achat du produit.

3. La réparation n'aura aucun effet sur la date limite originale de la garantie et n'entraînera pas le renouvellement ni l'extension de la même.

4. Lors de la réparation, si aucun défaut n'est détecté, les frais relatifs à la vérification technique seront de toute façon facturés à l'utilisateur.

5. La garantie n'est pas valable si le dommage est déterminé par: des chocs, des chutes, l'utilisation impropre du produit, l'utilisation d'une alimentateur/chargeur de batterie non original, des événements accidentels, des altérations du produit, remplacement/décollement des sceaux de garantie et/ou la falsification du produit. En outre, la garantie ne couvre pas les dommages causés durant le transport ou par l'utilisation d'emballages non originaux.

6. La garantie ne couvre pas l'impossibilité d'utilisation du produit, d'autres coûts accidentels ou conséquents ou d'autres dépenses soutenues par l'acheteur.

JFB MEDICAL

# **GLOBUS**

**ITALIAN** EXCELLENCE

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - Tel. (+39) 0438.7933

[globuscorporation.com](http://globuscorporation.com) |   

JFB MEDICAL